

BACTRACK®

breath alcohol detector

TESTS BREATH FOR THE PRESENCE OF ALCOHOL



OWNER'S  
MANUAL

## Kalibrálás

A BACtrack alkoholtesztetek kalibrálását az alábbi társaság végzi:

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a, Praha 9 190 00, Cseh Köztársaság

Kalibrálás egyeztethető a beszállító honlapján, esetleg az alább feltüntetett elérhetőségek valamelyikén:

[www.bactrack.cz](http://www.bactrack.cz) / [www.bactrack.sk](http://www.bactrack.sk)

[objednavky@sunnysoft.cz](mailto:objednavky@sunnysoft.cz)

+420 222 998 222

+420 603 561 155

*\*Kalibráció elvégzése legalább minden 12 hónappal ajánlatos.*

**\*\*Olyan személyek magatartását, illetve cselekedeteit illetően, akik alkoholt fogyasztottak, sem a gyártót, sem az importőrt, sem az elárusítót nem terheli felelősség. Az alkoholtesztet használata az ilyen személyeket semmiképp nem mentesíti az adott országban érvényes törvények betartásával járó felelősségüktől.**

# Az alkohol hatásai

BAC	
0,02-0,03%	Enyhe eufória, félnétség veszítése. Tompító hatás nem észlelhető.*
0,04-0,06%	Nyugalomérzet, ellazultság, korlátlanabb gátlások, melegérzet. Eufória. Nehezebb döntőképesség, lassúbb emlékezőképesség. Csökkent megfontoltság. Gépkocsivezetés tudásszintjének visszaesése.
0,07-0,09%	Mérlegelés, továbbá beszéd-, látás- és hallóképesség, valamint időérzés mérsékelt rosszabbodása. Eufória. Csökkent megítélőképesség és önuralom. Legyengült figyelem, felfogóképesség és emlékezet. Gépkocsivezetés tudásszintjének visszaesése.

A készülék a mérés eredményeit % BAC egységekben mutatja ki, az ezrelékes értékek tízszer magasabbak (pl. 0,13 % BAC = 1,3 ‰).

BAC	
0,10-0,12%	Kifejezetten csökkent motorikus koordináció, ésszerű ítélőképesség elvesztése. A beszéd érthetlenné válhat. Egyensúlyérzés elvesztése, látás és hallás kiesése, időérzés rosszabbodása. Eufória.
0,13-0,15%	Test feletti uralom erősen elveszik. Homályos látás, egyensúlyérzés elvesztése. Az eufória csökken, jelentkezik a diszfória (szorongás, nyugtalanság).
0,16-0,20%	A diszfória átveszi az uralmat, rosszullet lép fel.
0,25%	Járni csak segítséggel képes. Teljes zavarodottság. Rosszullettel kísért diszfória.
0,30%	Ájulás.
0,40% a vice	Kóma, légzéskiesés általi halál veszélye fenyeget.**

\* Az alkohol általi befolyásoltság következményei egyénenként nagymértékben változóak.


\*\* Bizonyos egyéneknél a halál bekövetkezhet már alacsonyabb BAC értéknél is.

# ELŐKÉSZÜLET

## Szárakelem behelyezése

Helyezzen be 1 db AAA típusú szárakelemet.

# VÁZLAT

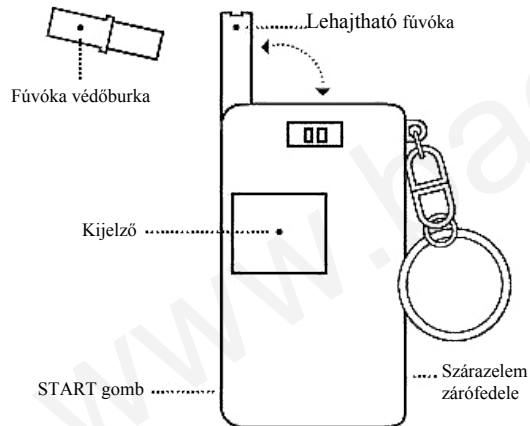

# MÉRÉS

## FONTOS



Teszt elvégzését megelőzően, 20 percnek el kell telnie az utolsó fogyasztástól (étel, ital, dohányzás). Az időkivárást figyelmen kívül hagyása az érzékelő károsulását eredményezheti.




**1. LÉPÉS** (választható): Helyezze fel a fűvóka védőburkát.

**2. LÉPÉS**: Nyomja meg a START gombot, a BACtrack készülék megkezdí a visszaszámlálást.

**3. LÉPÉS**: Amikor a visszaszámlálás eléri a 2-es értéket, vegyen mély lélegzetet.

**4. LÉPÉS**: Amikor a visszaszámlálás eléri a 0 (nulla) értéket, a BACtrack készülék hangjelzést ad. Fújjon a fűvókába 5 másodpercig (amíg a csipogás meg nem szűnik).

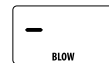

0.02  
%BAC

**5. LÉPÉS:** Az érzékelő kiértékeli a lehellet jellemzőit, és a kijelzőn megjelenik a becsült BAC érték.

**MEGJEGYZÉS:** A pontosabb eredmény eléréséhez, a tesztek között várjon egy percet. Magasabb szint tesztelesekor, a tesztek között várjon 3-5 percet.

### Hibajelentések

FL

**A kijelzőn "FL" jelentés íródik ki:**

- A felhasználó nem kezdett el fújni a felfutási idő leteltével.
- A felhasználó nem fújt be 5 másodpercig egyfolytában.
- A felhasználó nem tartotta be a 20 perces kivárási időt.

H

**A kijelzőn "H" jelentés íródik ki:**

A szint meghaladta a 0,40% BAC felső határértéket. Be kell tartani a 20 perces kivárási időt.

Err

**A kijelzőn "Err" jelentés íródik ki:**

Megkárosodott az érzékelő - lépjen kapcsolatba az ügyféltámogatással.

0.03  
%BAC

**Szárazelem lemerült állapotának szimbóluma jelenik meg:**  
Cserélje le a teszter AAA típusú szárazelememét egy újra.

## ÉRZÉKELŐ TISZTÍTÁSA

A teszter első használatakor, illetve annak hosszabb ideje (3 és több hét) történt használatát követően, az érzékelő felülete beszenyeződhet. A maximálisan pontos mérés érdekében, az érzékelőt 2 tesztelessel meg kell tisztítani. Két teljes teszt elvégzésével a teszter használatra kész.

## FIGYELMEZTETÉS

1. Teszt végrehajtását megelőzően, 20 percnél el kell telnie az utolsó fogyasztástól (étel, ital, dohányzás). Az időkivárást figyelmen kívül hagyása pontatlan mérési eredményhez vezethet, illetve az érzékelő károsulását eredményezheti.
2. A BACtrack készülékbe ne fújjon füstöt, étel- vagy italmaradékot, az érzékelő károsulását eredményezheti.
3. Tesztelést ne végezzen erős szélben, vagy füstös helyiségben.
4. A teszter kalibrálását rendszeresen végeztesse el.
5. A teszter 0-40°C üzemhőmérsékleti értékhatár között használható.
6. Tesztelést ne végezzen metilalkoholt, izopropanolt, vagy acetont tartalmazó anyag jelenlétében.
7. **Olyan személyek magatartását, illetve cselekedeteit illetően, akik alkoholt fogyasztottak, sem a gyártót, sem az importőrt, sem az elárusítót nem terheli felelősség. Az alkoholteszter használata az ilyen személyeket semmiképp nem mentesíti az adott országban érvényes törvények betartásával járó felelősségüktől.**